

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CONFIGURAÇÕES	ALTURA (cm)	LARGURA (cm)	COMPRIM. (cm)	PESO (Kg)	Potência (W)	VOLTAGEM (opcional)
UTA P	50	37	73	8	150	127/220
UTA G	50	64	73	10	200	127/220
UTA G-2	56	64	73	11	200	127/220

OBS.: MEDIDAS EXTERNAS.



Premium Ecológica Ltda

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE
MINAS GERAIS - BRASIL
CNPJ: 66.305.590/0001-79

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

www.premiumecologica.com.br
vendas@premiumecologica.com.br

MANUAL UTA TD 02/2016



UTA TD
Unidade de
Tratamento de Aves
Controle Digital Temperatura
AGEON

Antes de ligar o equipamento,
leia atentamente as instruções
contidas neste manual.



Premium Ecológica Ltda

AVENIDA HENFIL, 365 - BAIRRO SERRANO
CEP 30882.710 - BELO HORIZONTE MG BRASIL

VENDAS: (31) 3476.1052 - FAX: (31) 3476.1343
ASSISTÊNCIA TÉCNICA: (31) 3476.1617

Termo de garantia

Nº DE SÉRIE

Garantia por 24 meses

Modelos: UTA-TD ☐ P (130 w) ☐ G (230w) ☐ G 2 (230w)

Voltagem: ☐ 127V ☐ 220V

Data de Fabricação: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 2017 2018

1) Conteúdo e prazo de garantia

A) A PREMIUM ECOLÓGICA LTDA., garante o produto identificado, pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem ou solidariamente, em decorrência de vícios de qualidade do material que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

B) O início do prazo de influência da garantia, bem como a prova desta, se fará mediante a exibição deste termo.

C) A Premium Ecológica resguarda o direito de modificar, atualizar ou mesmo descontinuar a fabricação do equipamento.

2) Excludentes da garantia

A) O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais ônus e responsabilidade dos consumidores, além de não cobrir:

A.1 - Peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como: cabos, lâmpadas, etc.

A.2 - Danos sujeitos a quebras causadas por maus tratos.

A.3 - Manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do manual de instrução.

A.4 - Atualização e modernização dos produtos.

3) Invalidade da garantia

Esta garantia fica automaticamente inválida se:

A) Não for apresentado o termo de garantia ou documento equivalente com o nº de série;
B) O produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões específicos ou sujeito à flutuação excessiva de voltagem;

C) O produto sofrer qualquer dano por acidente (quebra), ou agentes da natureza (raios, enchentes, etc.);

D) O produto for manuseado ou usado em desacordo com o manual de instruções.

4) Forma e local de utilização da garantia

A) Para usufruir desta Garantia adicional, o consumidor deverá utilizar de um Posto Autorizado ou a Oficina da própria fábrica.

B) O transporte do produto ao Posto Autorizado ou para Fábrica é de inteira responsabilidade do consumidor.

C) O retorno é por conta da fábrica (via transportadora rodoviária ou correio)

 **Premium Ecológica Ltda**

Av. Henfil, 365 - Bairro Serrano - Cep. 30882-710 Belo Horizonte. MG - Tel. (31) 3476.1617 - Fax 3476.1343

Operação

1) Instalação

A) Certifique-se de que a voltagem do produto é compatível com a da rede elétrica.

B) O equipamento deve ser instalado em ambiente fechado, fresco, limpo e sem pó, não devendo receber luz forte ou calor (sol).

C) Em locais onde há variações de energia elétrica é recomendado o uso de estabilizador de voltagem (500 watts).

2) Ajuste de temperatura

(TERMOSTATO K 103 - AGEON - PID)

Coloque o termômetro na UTA e espere por 2 horas.

Regule a temperatura através do termostato digital.



Para alterar este valor:

> Pressione a tecla **Set**.

O display mostrará ~~35.0~~), em seguida será exibido o valor da temperatura ajustada de fábrica em 35,0° C.

> Para aumentar este valor Toque a tecla ▲

> Para diminuir Toque a tecla ▼

> Após, Toque a tecla **Set** e aguarde para que a chocadeira volte a controlar a temperatura.

A leitura da temperatura no equipamento digital fica oscilando em até 0,5° C

O tempo entre os ajustes devem ser de no mínimo 60 minutos.

A temperatura mínima de utilização do equipamento é de 26,0° C e máxima de 38,0° C.

(A temperatura mínima será sempre de 3,0° C acima da temperatura ambiente)

Tabela de temperaturas recomendadas

IDADE (DIA)	0 a 2	2 a 6	6 a 10	10 a 14	14 a 16	16 a 20
TEMPERATURA	36	36/34	34/32	32/30	30/28	28/26

3) Umidade

Para manter a umidade dentro da UTA (45 a 55%) mantenha sempre o reservatório lateral com água, evitando com isso a desidratação dos filhotes. (Pode-se colocar 2 ml. de formol no reservatório).

4) Limpeza/Desinfecção

A limpeza deverá ser feita pelo menos uma vez por semana com uma esponja umedecida em água com desinfetante.

A desinfecção deverá ser feita com uma substância a base de lisoforme, 20 mL.

Prepare essa solução em um recipiente à parte, deixando-a em evaporação dentro da UTA por duas horas. A UTA deverá estar ligada e regulada a 36° C.